

Histologie Labor


Einsendung von unfixiertem Nativgewebe

Gewebsentnahme

Ein für die Läsion repräsentatives Gewebestück muss mit einer scharfen Klinge ohne Druck (Quetschartefakte!) abgetrennt werden. Wenn möglich soll auch ein Stück Normalgewebe asserviert werden.

Verpackung


Legen Sie bitte das Gewebe zwischen zwei vollständig mit einer physiologischen Kochsalzlösung getränkte Tupfer in ein zylindrisches Schraubfläschchen. Diese Schraubfläschchen (40 ml; leer) sind vom Institut für Klinische Pathologie kostenlos erhältlich. Schliessen Sie den Schraubverschluss gut und bringen Sie auf dem Schraubfläschchen mit wasserfestem Filzstift eine Kurzbezeichnung an. Diese muss zusammen mit dem Einsendezettel eine eindeutige Identifikation des Gewebestückes ermöglichen.

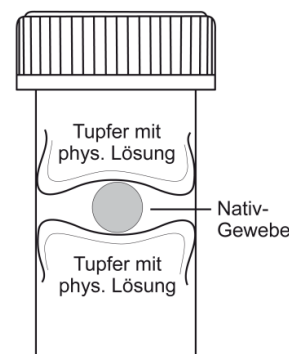

Versand

Packen Sie bitte zum Versand das gut verschlossene Schraubfläschchen in eine grössere Dose zwischen Eiswürfel oder eine Kältepackung (Temperatur 4°C). Diese Dosen (1000 ml) sind ebenfalls vom Institut für Klinische Pathologie kostenlos erhältlich. Das Paket muss per Kurier oder Express übersandt werden (die Transportdauer sollte nicht über 6h betragen).

Bitte die Schraubflaschen gut verschliessen! (Deckel durch leichtes Drehen im Gegenuhrzeigersinn gerade auf die Flasche aufsetzen und durch eine ganze, kräftige Drehung im Uhrzeigersinn fest schliessen.)

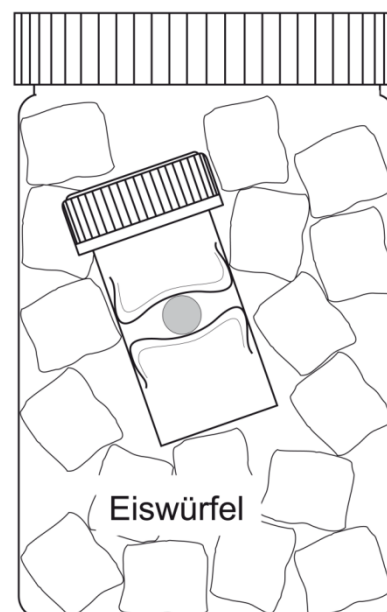

UniversitätsSpital Zürich
 Institut für Pathologie und Molekularpathologie
Histologie Labor PATH F 1
 Schmelzbergstrasse 12
 8091 Zürich / Schweiz

Annahmezeiten

Montag bis Freitag 07.00 – 17.30h; Samstag 08.00 – 12.00h

Tel: +41 44 255 25 29
 +41 44 255 25 32
 Fax: +41 44 255 45 32